

Partager des rapports de glycémie avec votre professionnel de la santé

Avec le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT ONE et l'application CONTOUR®DIABETES, vous avez la possibilité d'envoyer vos résultats à l'avance à votre professionnel de la santé ou de les partager le jour de votre rendez-vous.

- 1** Dans Mes résultats, appuyez sur l'icône du **menu principal**.
- 2** Dans le menu principal, appuyez sur **Mon suivi médical**.
- 3** Appuyez ensuite sur **Comptes rendus**.
- 4** Sélectionnez : **Journal de glycémie (PDF)**
Votre professionnel de la santé peut également vous demander de fournir l'un des autres rapports disponibles.
- 5** Tapez sur **Nom complet du patient** et saisissez votre nom.
Sélectionnez la période recommandée par votre professionnel de la santé et appuyez sur **Afficher journal**.
- 6** Le rapport sera affiché sur votre appareil mobile. Pour le partager avec votre professionnel de la santé, appuyez sur l'icône **Partager**.

Veillez l'envoyer par courriel à :



Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ascensia Diabetes Care en composant le 1-800-268-7200 de 9 h à 21 h (HE), du lundi au samedi.

Pour en savoir plus sur votre lecteur CONTOUR®NEXT ONE et l'application CONTOUR®DIABETES, rendez-vous sur contournextone.ca